



Puedes elegir...

Reproducir en Spotify

Reproducir en YouTube

[o continuar leyendo la última revisión](#) ↓

Finalmente estamos llegando a la parte práctica. Es hora de poner manos a la obra y aplicar todo el contenido teórico que estuvimos compartiendo. No olvides tomar fotos y etiquetarnos en [@Genox](#) (Facebook) o [@Genoxreproduccion](#) (Instagram). De esta forma nos sentiremos muy contentos.

¿Qué cosas tenemos que tener en claro a la hora de aplicar la técnica?

- A quién vamos a inseminar bajo esta modalidad.
- Qué tipo de dosis vamos a utilizar para hacerlo.
- Cómo será el recorrido del padrillo en la rutina de gestación.
- Como saber si realmente apliqué bien la técnica.
- Qué cosas pueden suceder mientras estoy inseminando y por qué.
- Qué ventajas estará introduciendo en la granja.

Si alguna de las afirmaciones anteriores generó una duda o no sabrías responder, cuidado, es hora de realizar tu esfuerzo extra y repasar el contenido de modo que puedas hacerlo con seguridad.

Dar tu "millá extra" marca la diferencia, mira este [video](#) para motivarte. Lo que atrae es el significado que nos deja.

No termina aquí, en los próximos capítulos entregamos un compilado de **preguntas frecuentes** para quitarle dudas habituales que van surgiendo. Además, un artículo de los 7 errores que cometemos a la hora de acostumbrarnos a realizar la técnica y al finalizar el examen, el acceso al [webinar](#), donde los expertos amplificarán información y responderán dudas que se hayan generado.

Si estás en la zona de cobertura de [Genox](#), y deseas aplicar la técnica con [tus propios padrones](#), preparamos un combo con descuentos especiales para los que realizaron el curso. ¡El stock es limitado!. Solicitalo enviando un correo a ventas@genox.com.ar con el asunto "deseo el combo del CIAPC"

Capítulo 8:

38. PASO 1 - "Limpiar la vulva". Vamos a introducir un catéter dentro del útero, hacerlo sin limpieza puede provocar [infecciones](#). Para evitarlo, asegúrate que la limpieza sea excelente.

Utiliza una [toallita desinfectante no alcoholizada](#) con la humedad necesaria. Comienza limpiando la vulva por fuera pero, con la segunda toallita **abre los labios vulvares** y limpia de adentro hacia afuera.

39. PASO 2 - "Introducir catéter" Rompiendo el envoltorio que lo cubre, evitando que la punta toque alguna superficie y [introduciéndolo](#), abre los labios vulvares e introdúcelo al igual que en la técnica convencional.

40. PASO 3 - "Verificación" Siempre que estás por realizar la introducción de la sonda, previamente asegúrate que el catéter esté fijo en el fondo de la vagina. Simplemente realiza un pequeño tirón hacia atrás (acción de retraerlo) y corrobora que no "sale" fácilmente.

41. PASO 4 - "Introducción de sonda" Empuja suavemente "con tres dedos" hasta que haga "lope" (no avance fácilmente). Espera unos minutos para que el Cérvix relaje (CSP1) y continua su introducción hasta el final.

42. PASO 5 - "Introducción de dosis". Luego de homogenizar con movimientos suaves, introdúcela ejerciendo presión sobre la [dosis](#) con tus dedos, verificando que no haya reflujó. Ya sabes que hacer en caso contrario (CSP3)

43. PASO 6 - "Terminado" Puedes retirar el conjunto completo, el semen ya quedó dentro del útero. Eso es todo. No olvides revisar que no haya

presencia de sangre o pus en la sonda.

Algunos autores recomiendan retirar primero la sonda, luego dejar el catéter unos minutos y finalmente, antes de sacarlo, realizar unos giros circulares desde la parte posterior.

Esto estimularía el cérvix y los movimientos uterinos. Incluso, otros autores recomiendan poner el padrillo en frente, luego de inseminar, para aumentar este estímulo. Puede que exista poca evidencia que generará un mayor beneficio en los resultados. Cada uno tiene "su técnica" y finalmente lo que vale son los resultados.

44. RESULTADOS. Descarga o imprime la siguiente [planilla](#) para agendar los resultados de la aplicación de la técnica obtenidos. Si tuviera alguna duda puedes despejarla enviando un correo a ventas@genox.com.ar o d.tecnico@genox.com.ar También hablaremos sobre este punto en el próximo capítulo. Estos resultados serán comparados con la [planilla](#) del punto 7 del capítulo 2.

Bonus track:

Mientras esperas en el paso 4 a que el Cérvix se relaje, puedes comenzar a inseminar la corda de al lado. Esto usualmente se conoce como "técnica 5 en 1" y ayuda a reducir aún más los tiempos. Simplemente realizas los pasos del 1 al 3 desde la Primera Cerda a la Quinta. Luego, vuelves a la primera para continuar con los pasos 4, 5 y 6.

También, puedes dividir los pasos entre dos personas. La primera realiza del 1 al 2 y la segunda del 3 al 5 o 6.

Para mayor claridad accede al video de YouTube de este capítulo.

Este mail es parte del [Curso de Inseminación Post - Cervical](#) de Genox, basado en la experiencia práctica de su autor. Puedes consultar la [bibliografía utilizada](#). Cualquier sugerencia, completar en [este formulario](#). Comparte este curso a las personas que creas que le será útil. Por dudas o consultas puedes escribirnos un correo a d.tecnico@genox.com.ar o ventas@genox.com.ar con el asunto: "CIAPC consulta".



GENOX